


経鼻チューブ固定用ホルダー「抜いちゃイカンホルダー」(MM51)取扱説明書

- ※ 本品は一人用です。同一患者にのみ使用してください
- ※ 本品の性能を最大限に発揮するため、以下の手順を必ず守って装着してください。
- ※ 装着位置が不適切な場合、自己抜去予防効果の低下や違和感の増強につながります。

Step1: 装着前の準備

- 接着部位(鼻下・両頬)の皮脂・汗・水分を除去してください
- 水または石鹼水で湿らせたガーゼで清拭後、十分に乾燥させてください
- アルコール等の揮発性消毒剤は使用しないでください

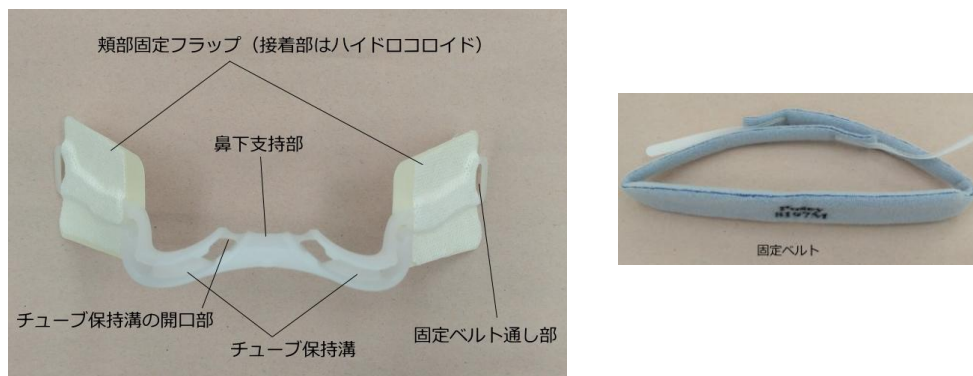

【別途必要なテープ】

院内で使用している粘着力の高いテープを下記のように加工して事前に用意してください。

- ※ 添付の「テープカット用テンプレート(実寸サイズ)」を参考にしてください(印刷時は「実際のサイズ／100%」で出力) 最終ページに記載

- ④鼻翼固定用 Y 字型 約 2-3.5cm × 5cm(Y 字型にカット)
- ③チューブ保持溝用 約 3.5cm × 5cm
- ②頬固定フラップ用 約 3-4cm × 3cm
- ①補強用被覆 3cm × 3cm(切り込みを入れる)



テープ固定前



テープ固定後



Step2: ホルダー中央位置の決定

- ① ホルダー中央の鼻下支持部の上縁を、鼻柱基部に軽く当てます(図 1)
- ② 正中をしっかりと合わせ、左右それぞれの「鼻孔」と「チューブ保持溝の開口部」が一致することを確認します(図 2)

【重要ポイント】

鼻尖ではなく、鼻柱部直下にあて、皮膚には触れないようにする。



(図 1)



図 2

Step3: 頬部固定フラップの貼付

- ① 頬部固定フラップの剥離紙(フィルム)を剥がす前に、頬部固定フラップを手の中で約 60 秒間温めます(ハイドロコロイドは体温で溶着し、接着力が高まります)
 - ② 両側の頬部固定フラップの剥離紙を剥がします
 - ③ ホルダーを左右に軽く広げながら、頬骨に沿わせるイメージで貼付します(図 3)
 - ④ このとき、頬部固定フラップが「耳の上半分」に向かうよう装着します(図 4)
 - ⑤ 貼付後、60 秒間軽く押さえて固定してください(図 5)
- ※ ハイドロコロイドは貼り直しができません
- ※ 位置修正が必要な場合は、新品に交換してください



図 3

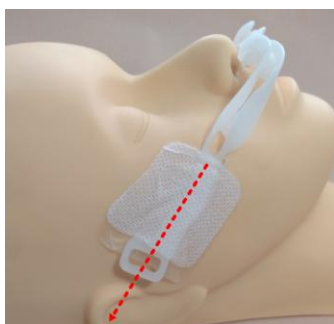


図 4



図 5

Step4: 中央補強テープの貼付

- ① ㊸鼻翼固定用 Y 字型テープを準備
- ② ㊸鼻翼固定用 Y 字型テープの二股部分を両鼻翼に貼付し、直線部分をホルダーの鼻下支持部に貼付します(図 6)
- ③ ホルダー鼻下支持部の裏側まで回し込むように貼付してください(図 7)

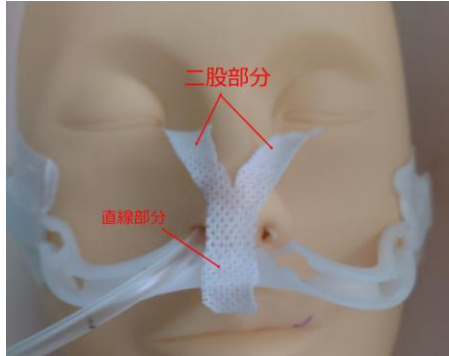


図 6



図 7

Step5: 胃管の固定

- ① 胃管を、鼻に近い側のチューブ保持溝から通しはめ込みます(図 8)
- ② 溝内の 3 か所の保持突起で、胃管が確実に保持されていることを確認してください
※12~16Fr の各種サイズの経鼻胃管に対応しています

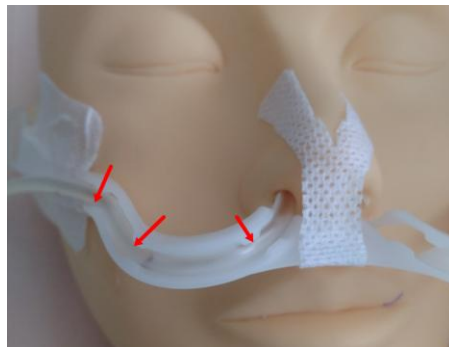


図 8

Step6: 追加固定

- ① チューブ保持溝部分で胃管とホルダーを「㊸チューブ保持溝用テープ」で巻き付け固定します(図 9)
- ② 頬部固定フラップ上で胃管を横方向に「㊸頬固定フラップ用テープ」で固定します(図 10)
- ③ さらに、「㊸補強用被覆テープ(切り込み入り)」で頬部固定フラップの耳側から追加固定します(図 11)



図 9



図 10

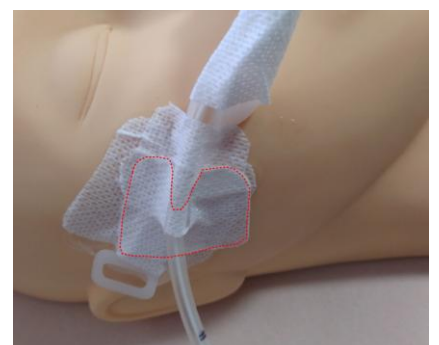


図 11

Step7:ベルト固定

- ①ホルダー両側のベルト通孔にベルトを通し、耳の上を通して後頭部に回します(図12)
- ②ベルトの長さを調整し、緩みがないようしっかり固定します(図13)

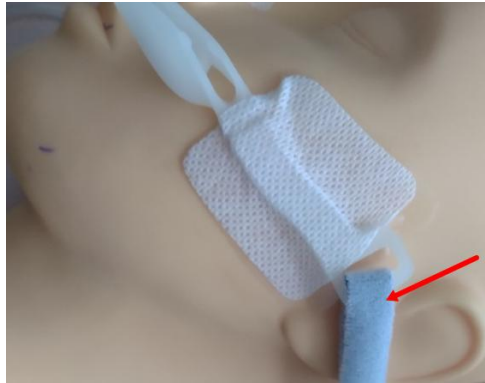


図 12

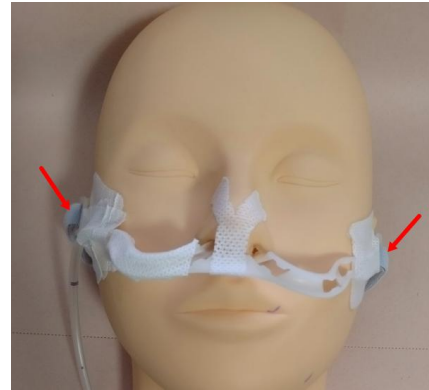


図 13

【使用期間の目安】

本品は、約5日間の連続使用が可能です

※使用環境、皮膚状態、接着状況により、使用期間が短くなる場合があります

※皮膚トラブルが認められた場合は、使用期間にかかわらず直ちに使用を中止してください

【取り外し方法】

ガーゼ等にぬるま湯、生理食塩水、または粘着テープ剥離剤を十分に含ませます。皮膚とテープの境界を湿らせながら、皮膚を押さえるようにしてゆっくり剥がします。強く引っ張ったり、一気に剥がしたりしないでください(皮膚トラブルの原因となります)

【頬部固定フラップ部ハイドロコロイドテープの交換方法】

- ① 頬部固定フラップに貼付されているハイドロコロイドテープ(皮膚接着用テープ)をすべて剥がし、フラップ表面の汚れを除去します
- ② 新しいハイドロコロイドテープの剥離紙と反対側(非粘着面)を、頬部固定フラップの貼付面に合わせます
- ③ 不織布テープを用いてハイドロコロイドテープをフラップに固定し、全体をしっかり押さえます
- ④ 反対側の頬部固定フラップも同様に交換してください

※ 頬部固定フラップ部のハイドロコロイドテープは、皮膚との接着力低下や汚染が認められた場合に交換してください。

【注意・警告事項】

- ◆ 本品は医療機器との併用による補助的な製品(雑品)であり生命維持・治療・診断を目的とした医療機器ではありません。
- ◆ 本品は医療機器との併用による補助的なテープ製品(雑品)でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保証するものではありません。
- ◆ ご使用前に併用する医療機器間の接続、性能等に問題ないか確認してください。
- ◆ ご使用前に製品の破損がないか必ず確認してください。
- ◆ 本品の使用は定期的に新しいものと交換してください。また、皮膚状態、湿度、体位、使用機器等の使用環境により早期交換が必要になる場合があります。定期観察で事前に“はがれ”等の異常を予見し、早期交換を行ってください。
- ◆ 異常が早期に発見できるように常に観察してください。特に体動、分泌物の多い場合は注意深く観察してください。
- ◆ 固定が不十分と思われる場合には使用を中止してください。
- ◆ 肌に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ◆ 本品を安全にご使用頂くために、ご使用に際してのプロトコル(院内の使用手順・基準)を作成してください。
- ◆ 経鼻チューブの挿入およびチューブ交換、テープ交換に関しては院内のプロトコルに従って下さい。

【保管と使用期限】

- 使用期限は製造から<2年>です。
- 保管は一般的な病院内の室温保存で直射日光が当たらない場所。夏場や冬場の外気温に近くなるような保管場所はお避け下さい。




株式会社メディカルプロジェクト


静岡県葵区大鋸町1番地の12

TEL: 054-252-1141


【テープカット用テンプレート(実寸サイズ)】

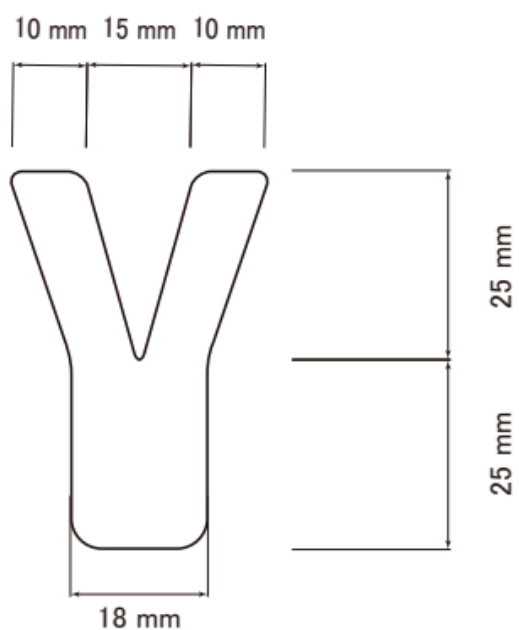


①鼻翼固定用Y字型

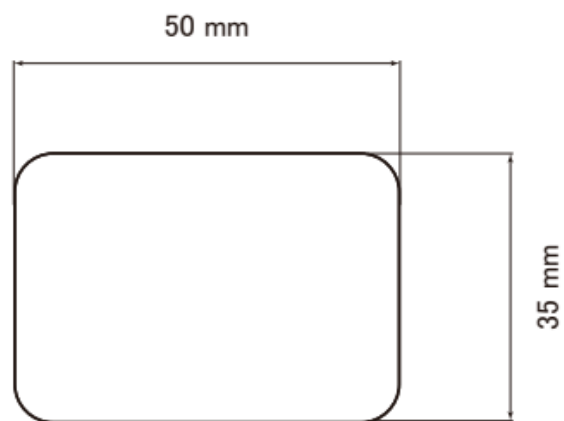

②チューブ保持溝用

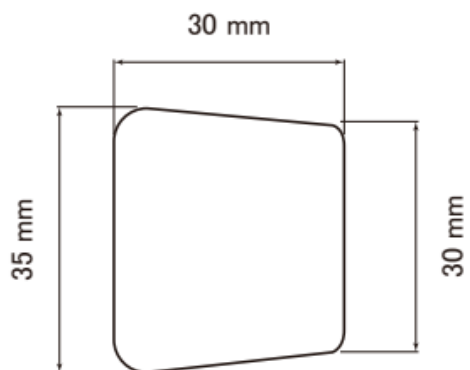

③頬固定フラップ用

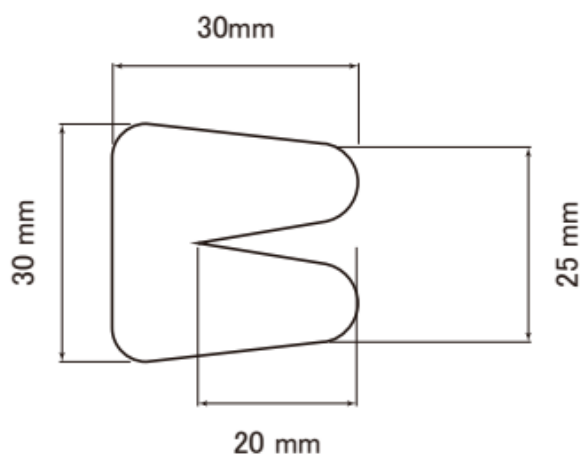

④補強用被覆